

Gebruikershandleiding
Otolift Modul-Air Smart



Inhoud

1	Veiligheid	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Symbolen en etiketten	3
1.2.1	Veiligheidswaarschuwingen	3
1.2.2	Opmerking	3
1.3	Beoogd gebruik	3
1.4	In redelijkheid te voorzien misbruik	4
1.5	Veiligheidsonderdelen	4
1.6	Voorzorgsmaatregelen	5
1.7	Etiketten	5
1.8	Noodsituaties	5
2	Beschrijving van de traplift	6
2.1	Ontwerp en werking	6
2.1.1	Onderdelen traplift	6
2.1.2	Display-interface	7
3	Gebruik	8
4	De traplift verplaatsen met de afstandsbediening	15
5	In geval van een storing	16
6	Optioneel: Om hulp roepen	17
7	Berichten en alarmen op het display	18
7.1	Actuele status	18
7.2	Alarmen op het display	20
8	Onderhoud	23
8.1	Reinigen	23
8.2	Onderhoudsschema	23
8.3	De batterij van de afstandsbediening vervangen	23
8.4	De batterij van de sleutel vervangen	23
9	Verwijdering	23
10	Technische gegevens	24
10.1	Typeplaatje	24
Bijlage 1: Schema		25

Inleiding

Over dit document

Deze handleiding bevat technische beschrijvingen en instructies voor het volgende product:

Productcategorie	Traplift
Productnaam	Otolift Modul - Air Smart
Serienummer	

Schrijf het serienummer van uw product in de ruimte hierboven om dit later te kunnen raadplegen.

Deze handleiding bevat alle instructies en veiligheidsinformatie die u nodig hebt om het product te kunnen gebruiken.

Deze handleiding is bedoeld voor:

- De eindgebruiker die het product gebruikt;
- De producteigenaar die het product reinigt

Originele instructies

Deze handleiding is in meerdere talen vertaald. De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere taalversies zijn vertalingen van de originele handleiding.

Auteursrecht

De inhoud van deze handleiding wordt beschermd door het auteursrecht en andere wetten betreffende het intellectuele eigendom. De inhoud van deze handleiding mag uitsluitend na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant worden gekopieerd, aangepast, gereproduceerd of vertaald. Deze handleiding mag uitsluitend na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant worden gepubliceerd, uitgezonden, vertoond of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Otolift Trapliften BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel, schade aan het product of schade aan eigendommen die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik, te voorspellen misbruik of door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding. Dit strekt zich ook uit tot onbevoegde wijzigingen aan het product en het gebruik van niet goedgekeurde reserveonderdelen, gereedschap of accessoires.

Otolift Trapliften BV behoudt zich het recht voor om deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

1 Veiligheid

1.1 Inleiding

Zorg dat u de instructies in deze handleiding aandachtig hebt gelezen en begrepen voordat u de traplift gaat gebruiken.

Als u de instructies in deze handleiding niet opvolgt, kan dit risico's inhouden voor personen, de omgeving en de traplift.

Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plaats in de buurt van de traplift.

Neem altijd de informatie in acht (zoals vermeld op etiketten en het typeplaatje) die rechtstreeks verband houdt met de traplift en zorg dat deze gegevens leesbaar blijven. Etiketten die onleesbaar zijn geworden of zijn beschadigd, moeten worden vervangen.

Neem altijd de betreffende wetten en voorschriften in acht die niet in deze handleiding zijn opgenomen.

1.2 Symbolen en etiketten

1.2.1 Veiligheidswaarschuwingen

Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen die in acht moeten worden genomen om persoonlijk letsel te voorkomen. Elke veiligheidswaarschuwing wordt aangegeven met een signaalwoord. Het signaalwoord vertegenwoordigt het risiconiveau dat is verbonden met een gevaarlijke situatie; zie de onderstaande tabel.

Signaalwoord	Risico op verwondingen	Resultaat wanneer de instructie wordt genegeerd of niet correct wordt opgevolgd
 WAARSCHUWING!	Middelhoog	Kan tot dodelijk of ernstig letsel leiden
 VOORZICHTIG!	Laag	Kan tot licht of enigszins ernstig letsel leiden

Veiligheidswaarschuwingen aan het begin van een paragraaf gelden voor de volledige paragraaf.

Veiligheidswaarschuwingen die naar een bepaalde zin of een stap in een procedure verwijzen, maken deel uit van de tekst.

1.2.2 Opmerking

Zinsneden die niet naar gevaren verwijzen, worden aangegeven met het signaalwoord **Opmerking**. Bij deze zinsneden staat geen veiligheidssymbool.

Signaalwoord	Functie
Opmerking	Verwijst naar aanvullende informatie die niet rechtstreeks verband houdt met gevaar of schade.

1.3 Beoogd gebruik

De Otolift Modul - Air Smart traplift is ontworpen voor uiteenlopende trappen en situaties en is bedoeld om één persoon op een comfortabele manier naar een andere verdieping te vervoeren. De traplift mag alleen worden gebruikt bij de trap waarvoor Otolift de traplift oorspronkelijk heeft geconfigureerd en geïnstalleerd.

De Otolift Modul - Air Smart mag uitsluitend worden geïnstalleerd of gedemonteerd door personeel dat door Otolift is opgeleid.


1.4 In redelijkheid te voorzien misbruik

Het volgende wordt als onbedoeld gebruik beschouwd en leidt tot het ongeldig worden van de garantie / aansprakelijkheid van Otolift.

- Gebruik door minderjarigen of door personen met een geestelijke handicap die niet onder toezicht staan.
- Vervoer van dieren of goederen, tenzij de traplift speciaal voor deze toepassing is aangepast door Otolift.
- Vervoer van meer dan één persoon tegelijkertijd.
- Vervoer van een persoon die zwaarder is dan de maximale laadcapaciteit zoals vermeld in de technische specificaties in deze handleiding.
- Gebruik zonder het omdoen van de veiligheidsgordel.
- Gebruik in omstandigheden die afwijken van de vermelde gebruiksomstandigheden of deze te boven gaan.
- Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- Het niet verhelpen van gebreken, storingen of defecten die een veiligheidsrisico inhouden.
- Het onbevoegd verwijderen of aanpassen van onderdelen of veiligheidsvoorzieningen van het product.
- Gebruik van reserveonderdelen of accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

1.5 Veiligheidsonderdelen

De traplift is uitgerust met verschillende veiligheidsonderdelen die een veilige omgang met het product garanderen.

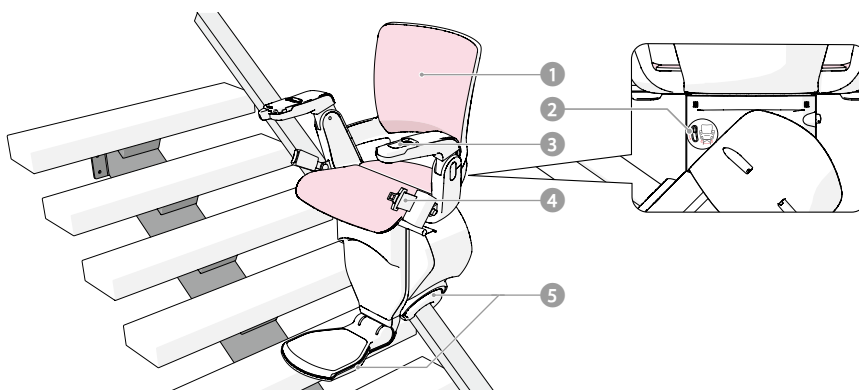

1 Draaiende stoel en voetplaat

Bij smalle trappen kan het nodig zijn om de stoel gedraaid omhoog of omlaag te bewegen om obstakels voor het hoofd / de knieën of de voetenplank te vermijden.

2 Nood-draaiontgrendeling

Bij een storing aan de traplift of een andere noodsituatie gebruikt u de nood - draaiontgrendeling aan de achterzijde van het voorframe om de traplift handmatig naar de trap te draaien zodat de lift veilig kan worden verlaten.

3 Aan/uit-schakelaar armleuning

De aan / uit - schakelaar in de armleuning zorgt ervoor dat de gebruiker op de eindpunten veilig op de traplift kan gaan zitten of deze kan verlaten zonder de mogelijkheid dat iemand anders de traplift bedient met de afstandsbedieningen. De aan / uit - schakelaar functioneert ook als de stopknop wanneer een noodstop moet worden gemaakt.

4 Veiligheidsgordel met sensor

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet van de traplift kan vallen, is deze standaard uitgerust met een veiligheidsgordel met sensor. Deze zorgt ervoor dat de traplift alleen kan bewegen wanneer de veiligheidsgordel is omgedaan.

5 Sensoren voor obstructies

De traplift is in de voetplaten en rondom de rail uitgerust met sensoren voor obstructies, die ervoor zorgen dat de traplift tot stilstand komt wanneer iets de traplift blokkeert. Bij het activeren van de sensor kan de traplift alleen in de tegenovergestelde richting bewegen om de obstructie te kunnen verwijderen.

1.6 Voorzorgsmaatregelen

Ondanks het veilige ontwerp en de doordachte constructie van de traplift alsook de beschreven beschermingsmaatregelen, houdt het product een bepaald restgevaar in. Deze handleiding bevat veiligheidsaanwijzingen die naar deze risico's verwijzen. De indeling en het aanzien van veiligheidsaanwijzingen die naar een bepaalde paragraaf of zin verwijzen, worden toegelicht in de inleiding. Algemene veiligheidsaanwijzingen zijn in het onderstaande overzicht samengebracht.

⚠ WAARSCHUWING!

- De traplift mag niet zonder toezicht worden gebruikt in de buurt van kinderen.
- Het mag kinderen niet worden toegestaan de traplift te gebruiken. Laat kinderen niet op of in de buurt van de traplift spelen.
- Plaats geen handen op de rails om beknelling te voorkomen.
- Draag tijdens het gebruik van de traplift altijd de veiligheidsgordel om te voorkomen dat u eraf valt wanneer de traplift in gebruik is.
- Houd beide armen en benen altijd op de traplift om beknelling te voorkomen.
- Gebruik dit product niet wanneer de stoel, de voetenplank, de rail of de veiligheidsgordel tekenen van schade vertoont.
- Gebruik dit product niet wanneer de behuizing gebroken, gebarsten of open is, of andere tekenen van schade vertoont.
- Schakel de traplift uit en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice wanneer u denkt dat de traplift onveilig is. Neem de traplift niet in gebruik totdat het probleem is opgespoord en verholpen.
- Onderdelen van de traplift mogen niet worden verwijderd, verplaatst of gerepareerd.


⚠ VOORZICHTIG!

- Vergewis u ervan dat de voedingskabel van de traplift zodanig is gepositioneerd dat niemand erop kan stappen of erover struikelen, en dat deze niet wordt blootgesteld aan beschadiging of belasting.
- De traplift bevat geen interne onderdelen die de gebruiker kan repareren. Probeer de traplift niet zelf te repareren of te onderhouden.


1.7 Etiketten



Dit etiket verwijst naar het gevaar van afknellen! Plaats geen handen op de rails om afknellen te voorkomen.

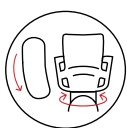

Dit symbool verwijst naar de locatie van de nood - draaiontgrendeling. Gebruik deze hendel om de stoel tijdens een stroomuitval of bij een storing aan de traplift in de richting van de trap te draaien, zodat de traplift op een veilige manier kan worden verlaten.

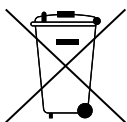

Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Zorg ervoor dat dit product op een milieuvriendelijke manier conform de plaatselijke voorschriften wordt gerecycled.

1.8 Noodsituaties

De traplift mag niet worden gebruikt voor brandpreventie of om personen te evacueren. Gebruik de traplift niet in geval van brand.

2 Beschrijving van de traplift

2.1 Ontwerp en werking

De traplift wordt langs de rail verplaatst door middel van een tandheugel en wordt aangedreven door een elektromotor met oplaadbare batterijen.

De batterijen worden opgeladen met een oplader die in de traplift is ingebouwd. De oplader wordt gevoed via oplaadpunten die zich in de rail bevinden en die zijn verbonden met een transformator die in een wandcontactdoos wordt gestoken.

Optioneel kunnen aanvullende oplaadpunten worden aangebracht op punten waar men op een veilige manier op de traplift kan gaan zitten of deze kan verlaten. Bijvoorbeeld: wanneer de traplift meerdere verdiepingen bestrijkt, kan een aanvullend oplaadpunt halverwege de rail op de eerste verdieping worden geplaatst.


De traplift kan op twee manieren worden bediend:

- Met behulp van de joystick aan het uiteinde van de armleuning
- Met de afstandsbedieningen die zich nabij de eindpunten van de rail bevinden, in het zicht van de traplift.


Er is een display ingebouwd in de armleuning voor het weergeven van praktische informatie zoals de batterijlading en de momentele status van de traplift. In geval van een obstructie of storing wordt het probleem aangegeven op het display. Raadpleeg voor meer informatie over het display en de interface paragraaf 2.1.2.

De traplift is uitgerust met verschillende veiligheidsonderdelen om uw veiligheid tijdens het gebruik te maximaliseren. Zie paragraaf 1.5. *Veiligheidsonderdelen* voor meer informatie.

2.1.1 Onderdelen traplift

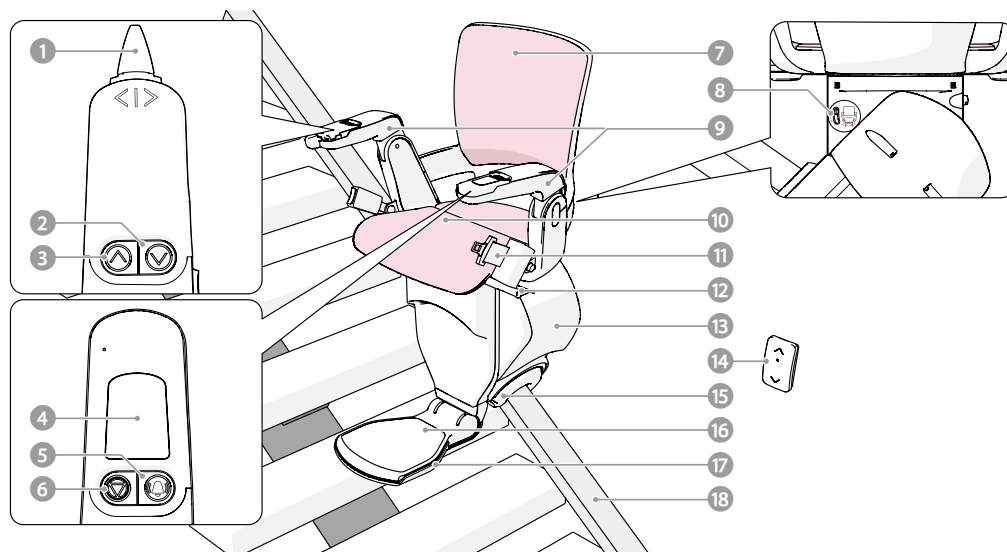


- | | |
|---|---|
| 1 Joystick | 10 Inklapbare zitting |
| 2 Voetenplank omhoog | 11 Veiligheidsgordel |
| 3 Voetenplank omlaag | 12 Ontgrendeling voor handmatig draaien (optioneel) |
| 4 Display | 13 Afdekking |
| 5 Noodoproep (optioneel) | 14 Afstandsbediening |
| 6 Aan/uit-schakelaar / stopknop | 15 Veiligheidsafdekking (rail) |
| 7 Rugleuning | 16 Inklapbare voetenplank |
| 8 Nood-draai-ontgrendeling voor aangedreven draaimechanisme | 17 Veiligheidsbescherming voetenplank |
| 9 Inklapbare armleuningen | 18 Rail |

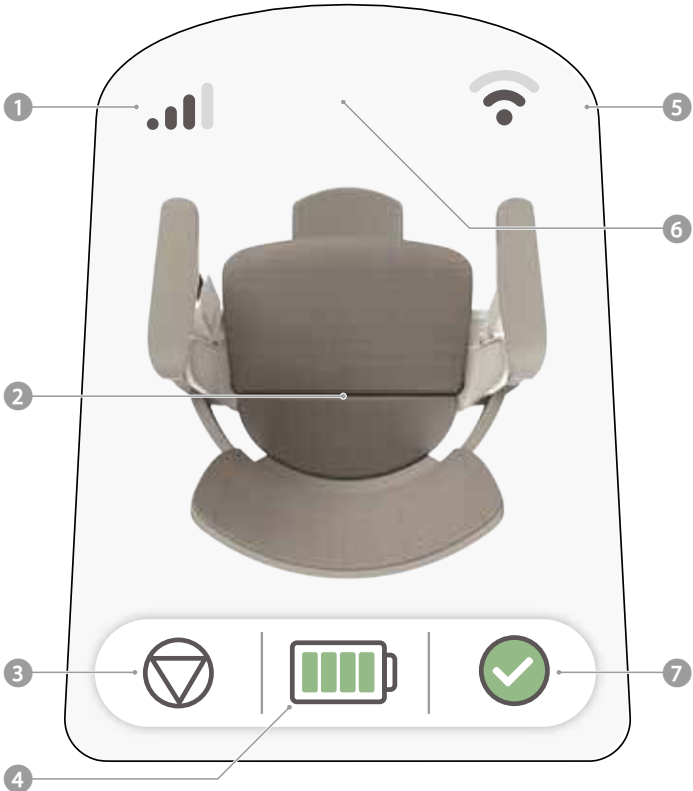				
1	Indicator sterkte GPRS-sig-naal	Zwak - Sterk		
				
2	Berichtgedeelte	Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over berichten		
3	Voedingsindicator	Ingeschakeld	Uitgeschakeld	
				
4	Batterijniveau	Laag - Hoog	Opladen	
				
5	Indicator sterkte wifi-sig-naal	Zwak - Sterk		
				
6	Status van de traplift	Vergrendeld	Onderhoud	
				
7	Status van de traplift	Gereed	Melding	Waarschuwing
				

3 **Gebruik**


- 1 Klap de zitting en de armleuningen omlaag.

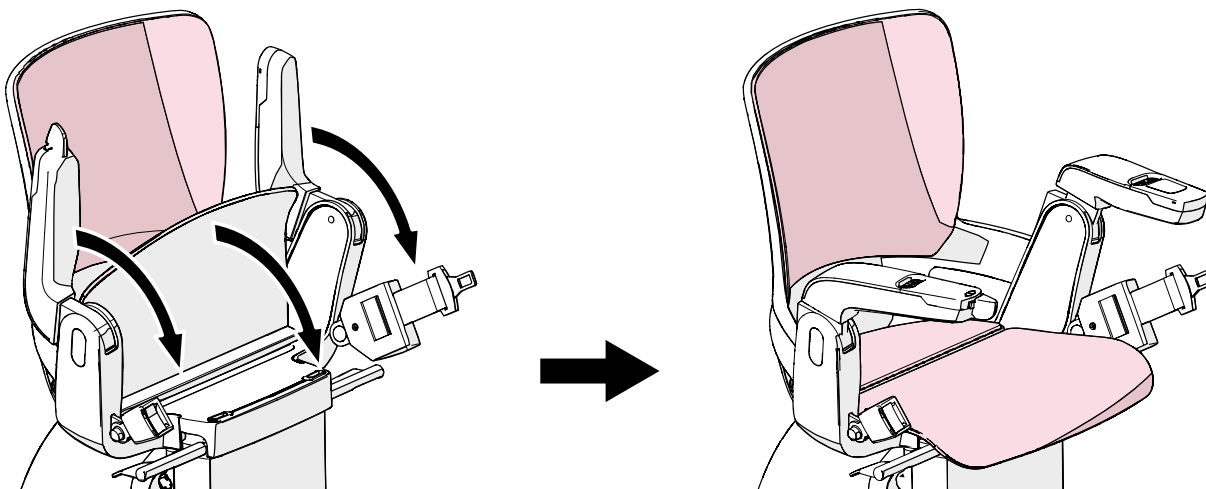


- 2 Schakel de traplift uit met de aan/uit-knop.

⚠ VOORZICHTIG!

Als u de traplift ingeschakeld laat, zou iemand de traplift kunnen laten bewegen met de afstandsbediening terwijl u op de traplift gaat zitten, waardoor u uw evenwicht zou kunnen verliezen en zou kunnen vallen.

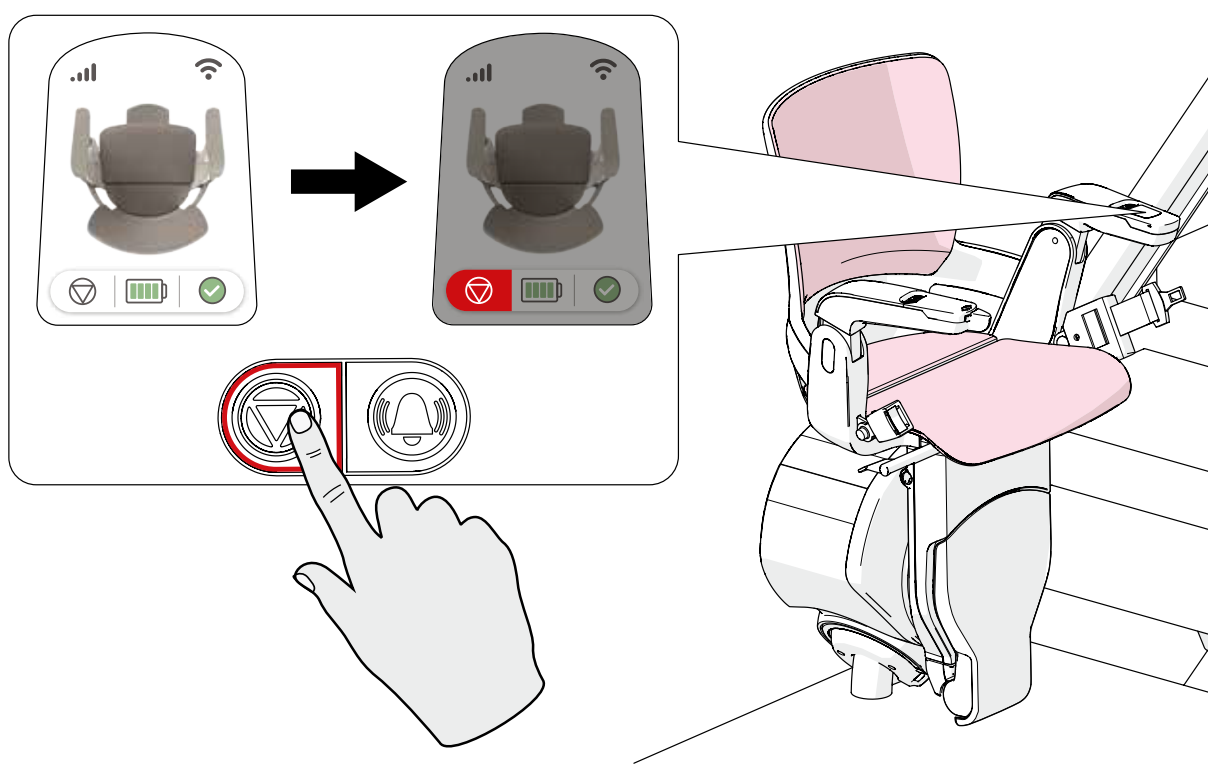


- 3 Ga op de stoel zitten.
- 4 Schakel de traplift weer in met de aan/uit-knop.

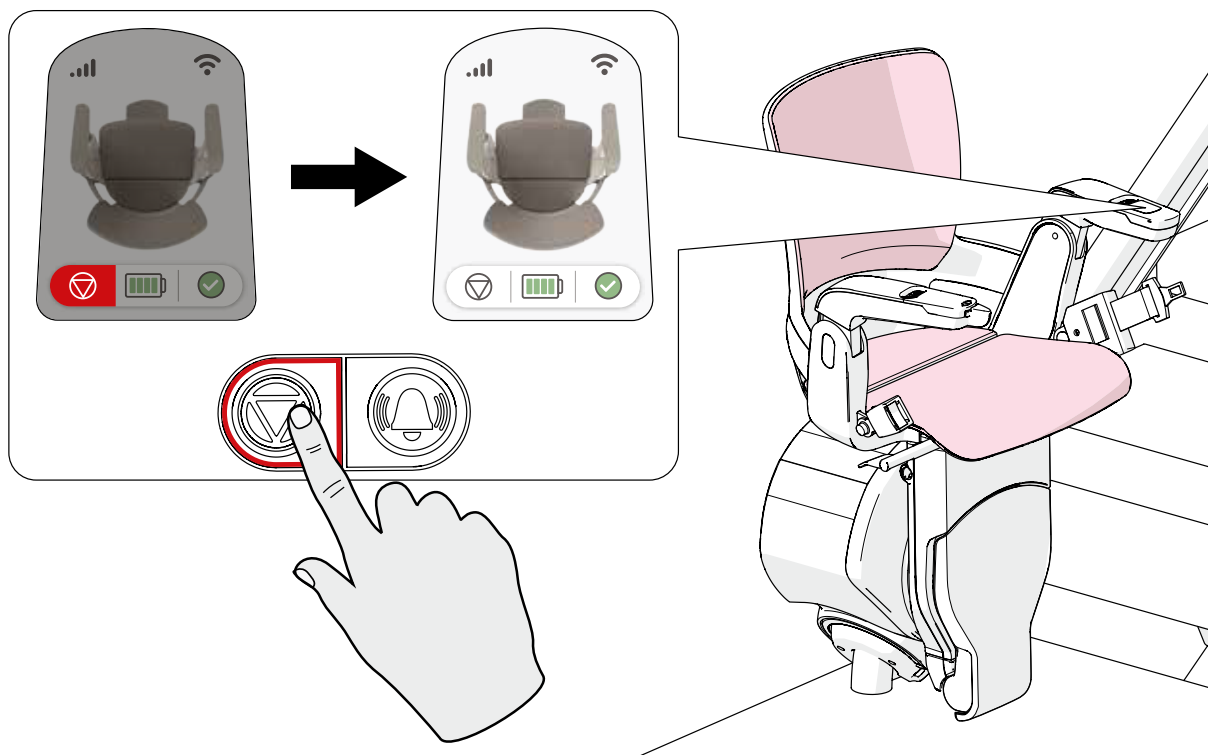


- 5 Druk op de knop 'voetenplank omlaag' en houd deze ingedrukt om de voetenplank omlaag te klappen.

Opmerking: de voetenplank wordt elektrisch in - / uitgeklappt. Probeer de voetenplank niet handmatig in of uit te klappen. Dit kan schade veroorzaken aan de traplift.

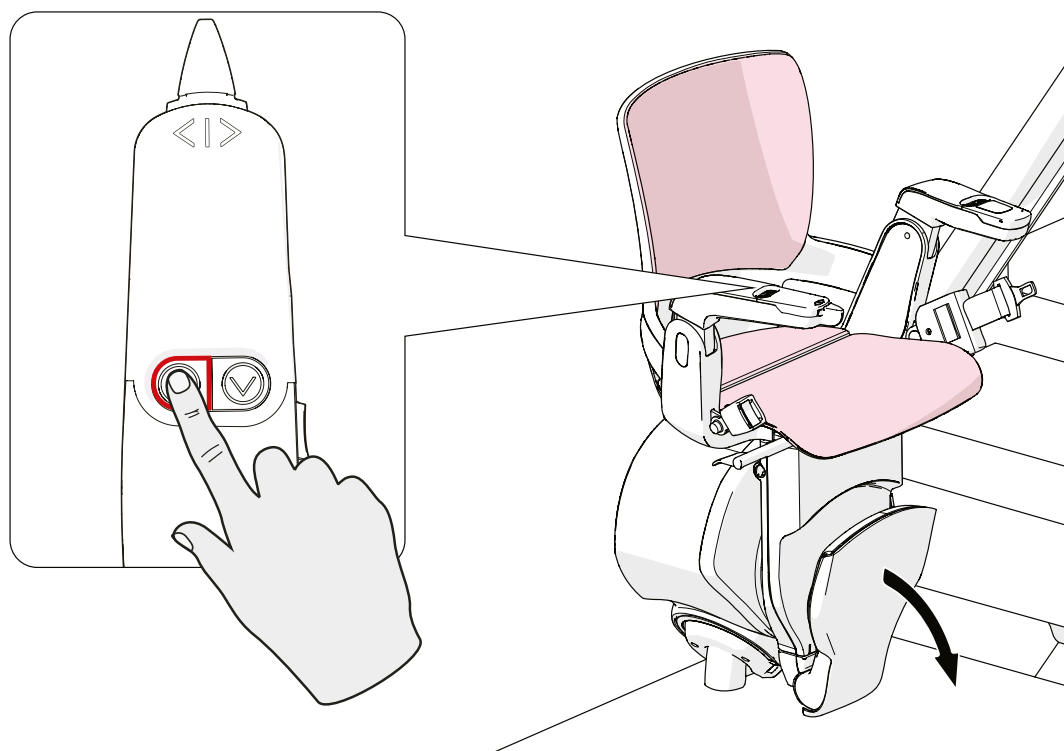

- 6 Maak de veiligheidsgordel vast.

Opmerking: De traplif zal niet bewegen als u de veiligheidsgordel niet vastmaakt.

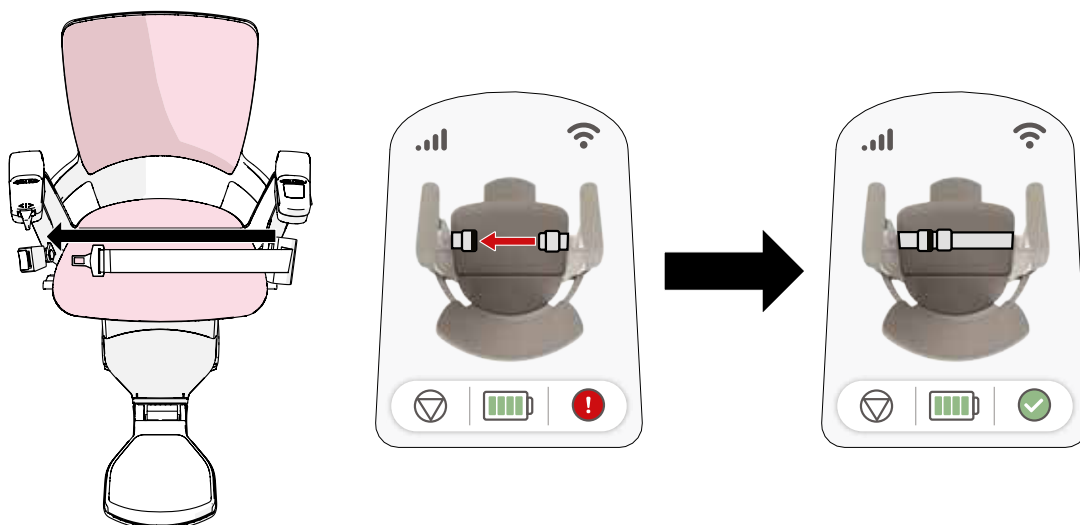


- 7 Vergewis u ervan dat er zich geen obstakels op de trap bevinden.
- 8 Beweeg de joystick in de gewenste bewegingsrichting en houd hem zo. De traplif verplaatst zich langs de rail zolang u de joystick bedient.


Opmerking: Als u de joystick loslaat, komt de traplif onmiddellijk tot stilstand.

Opmerking: als uw traplif gedraaide beweging gebruikt, wordt de stoel eerst naar de startpositie gedraaid voordat de beweging wordt gestart.



Opmerking: de voetenplank draait niet altijd in dezelfde richting als de stoel.

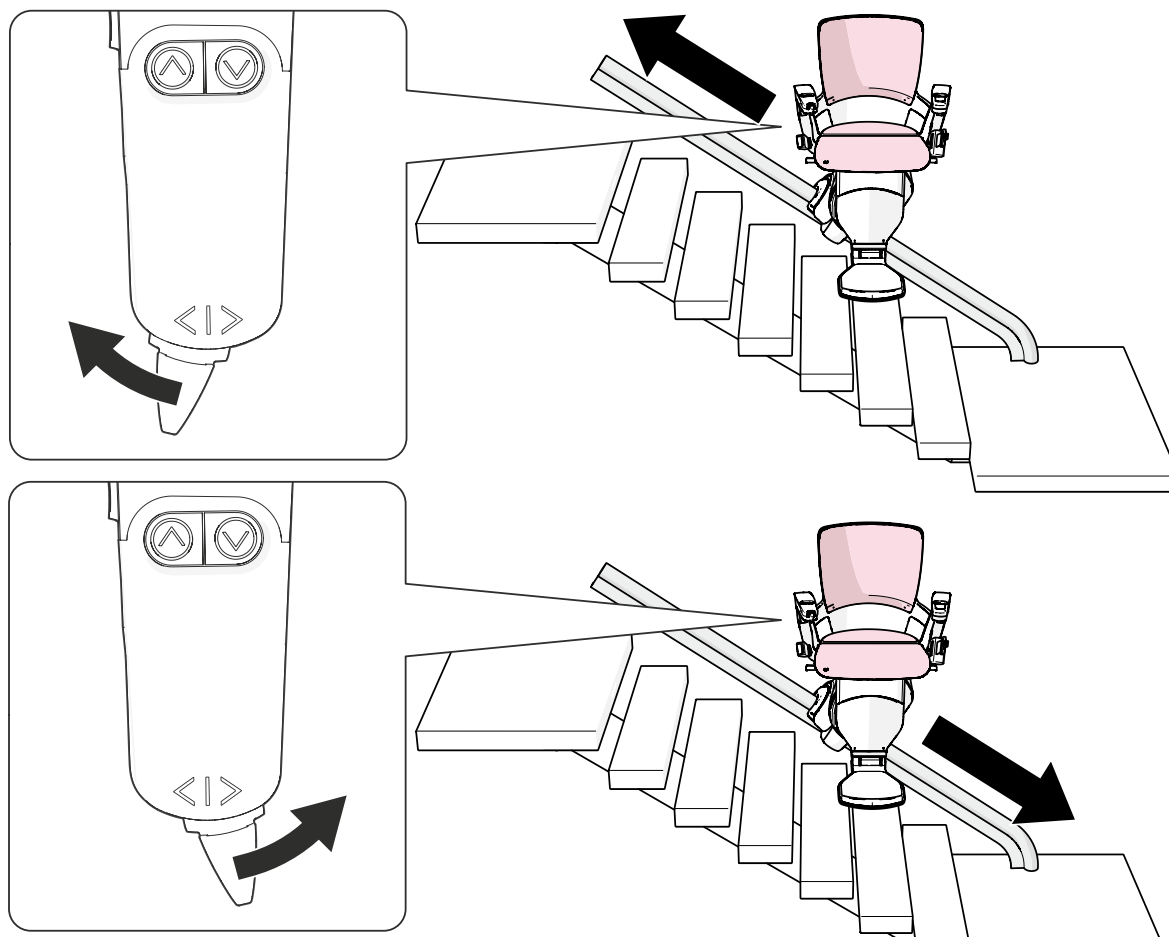

- 9 Houd de joystick in de gewenste stand totdat u het einde van de rail hebt bereikt, de traplift naar de uitstappositie is gedraaid en het display aangeeft dat de lift is 'geparkeerd' en wordt opgeladen.

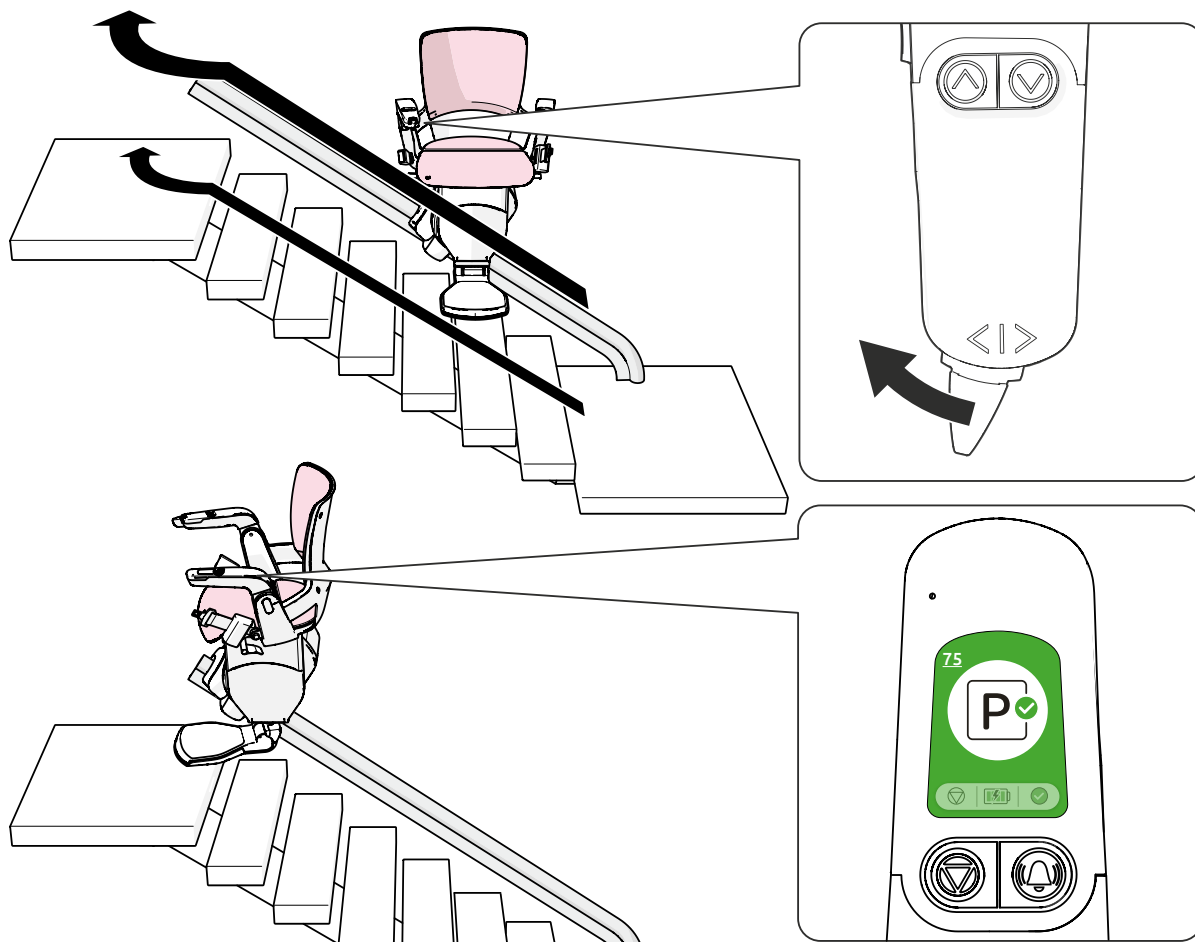


Opmerking: Als uw traplift niet met een elektromotor voor draaien is uitgerust, wacht u tot het display de melding van het parkeren en opladen toont, en gebruikt u de ontgrendeling voor handmatig draaien om de stoel en de voetenplank naar de uitstappositie te draaien.

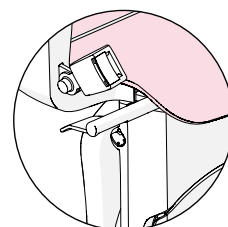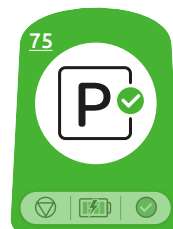


- 10 Schakel de traplift uit met de aan/uit-knop.

⚠️ VOORZICHTIG!


Als u de traplift ingeschakeld laat, zou iemand de traplift kunnen laten bewegen met de afstandsbediening terwijl u de traplift verlaat, waardoor u uw evenwicht zou kunnen verliezen en zou kunnen vallen.

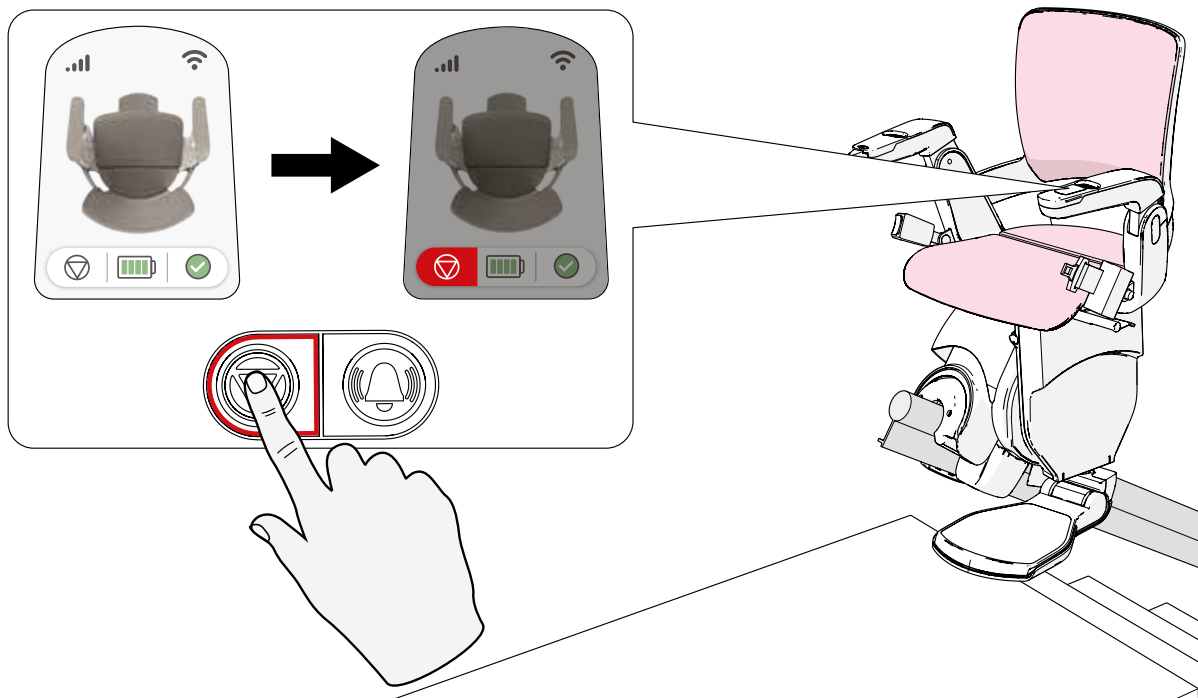

- 11 Maak de veiligheidsgordel los.

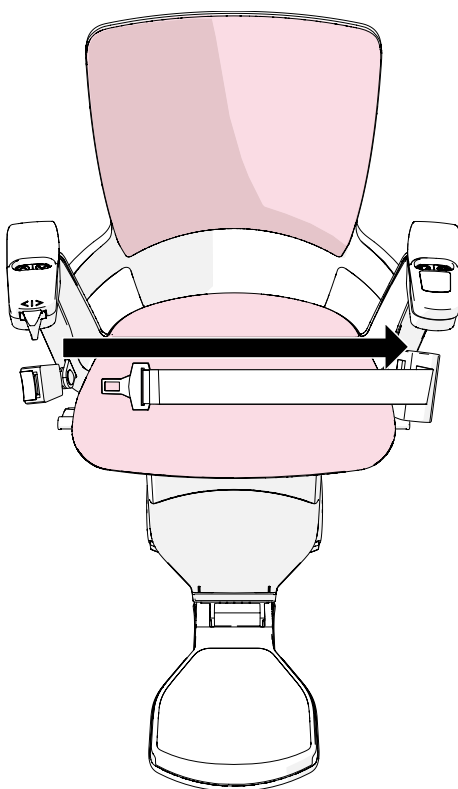


- 12 Sta op en stap voorzichtig van de traplif.
- 13 Schakel de traplif weer in met de aan/uit-knop.

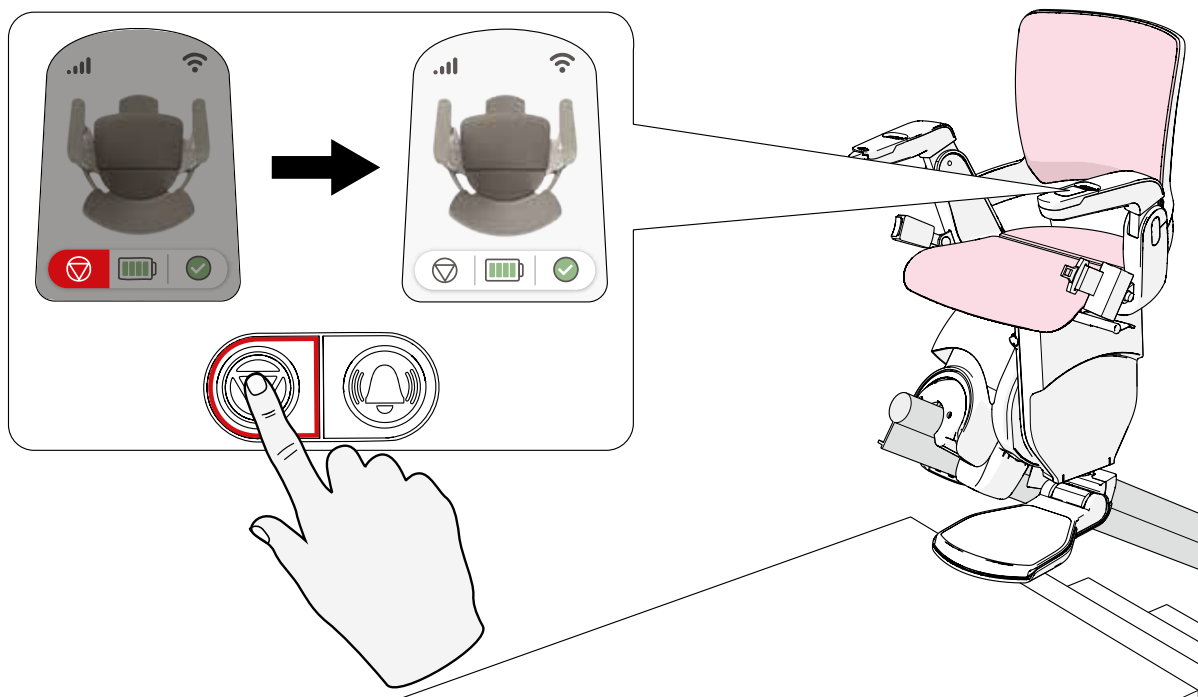

- 14 Houd de knop 'voetenplank omhoog' vast om de voetenplank omhoog te klappen.


Opmerking: Als uw traplif met een elektromotor voor draaien is uitgerust, draait deze eerst terug naar de neutrale positie alvorens de voetenplank omhoog te klappen.

Opmerking: als uw traplif is uitgerust met een handmatige draaistoel, gebruikt u de ontgrendeling om de stoel weer in de neutrale positie te zetten.

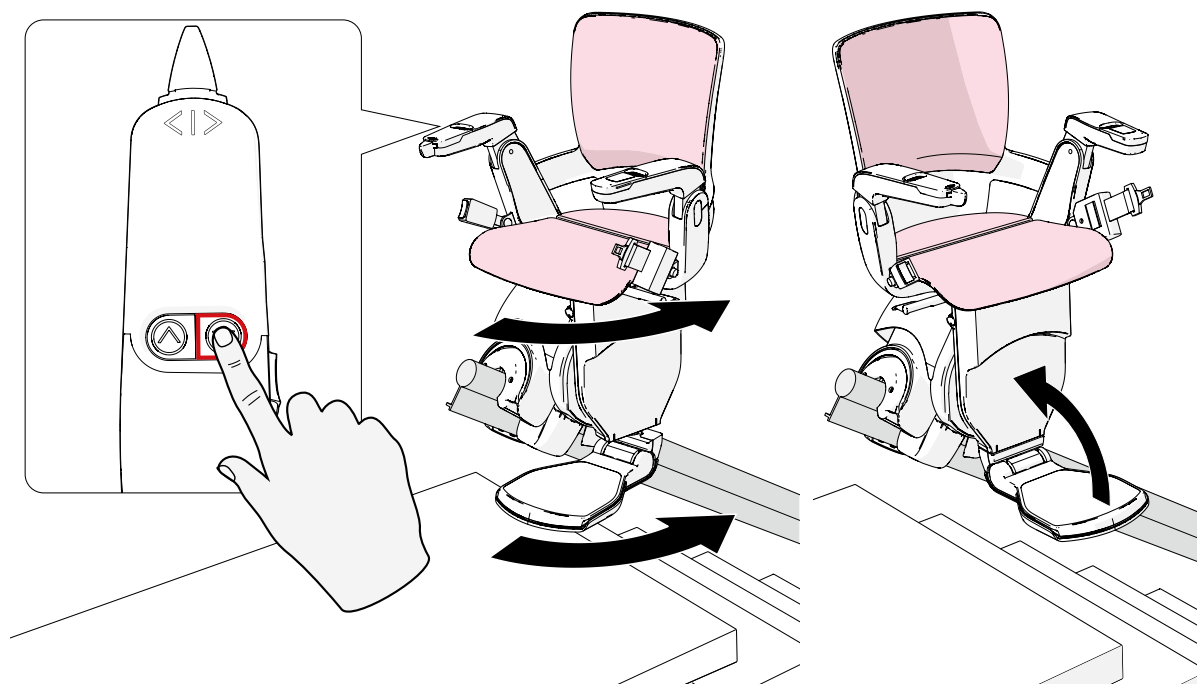


- 15 Klap de zitting en de armleuningen omhoog.

Optioneel: Als u er zeker van wilt zijn dat de traplift niet gebruikt kan worden zonder uw toezicht, kunt u de meegeleverde sleutel gebruiken om de traplift op afstand te vergrendelen en ontgrendelen.

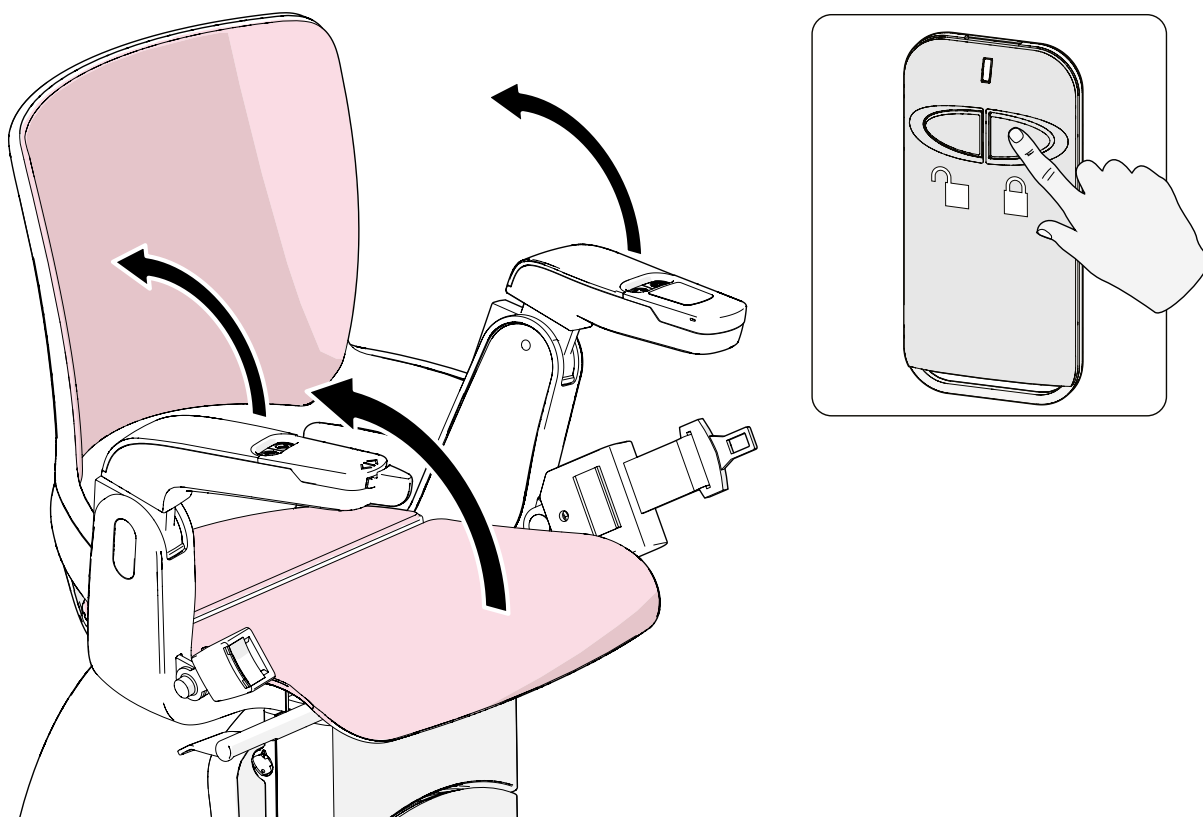

Optioneel: Schakel de traplift uit met de sleutelschakelaar als de traplift gedurende meer dan een week niet wordt gebruikt.

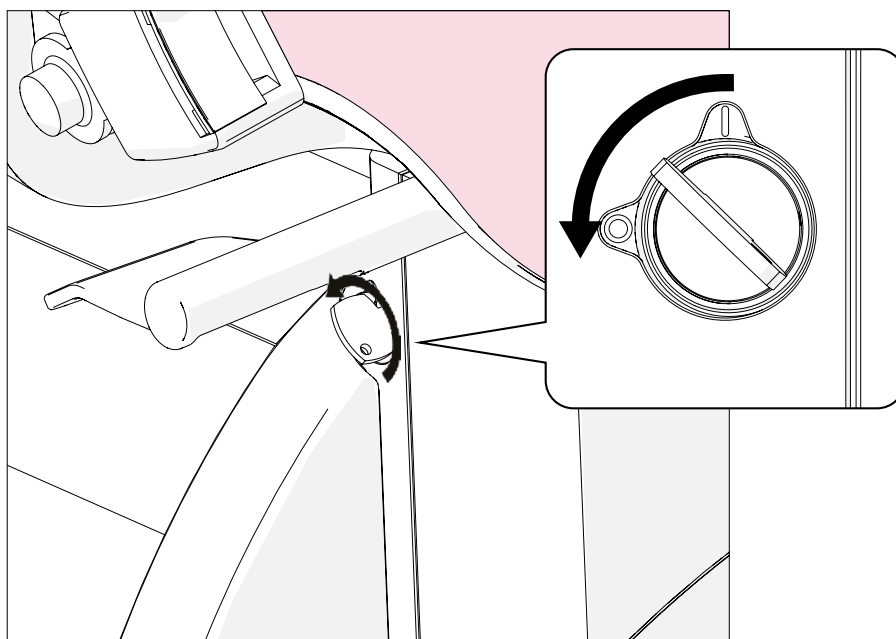


4 De traplift verplaatsen met de afstandsbediening

U kunt de afstandsbediening ook gebruiken om de traplift omhoog en omlaag te verplaatsen.

- 1 Controleer of de trap vrij is voordat u de traplift verplaatst.
- 2 Houd de afstandsbediening ingedrukt in de richting waarin u de traplift wilt verplaatsen.


Opmerking: Als uw traplift is uitgerust met de optie voor gedraaide beweging en de armleuningen omlaag zijn geklapt, draait de stoel naar de startpositie voordat de beweging wordt gestart. Als de armleuningen omhoog zijn geklapt, beweegt de traplift in de ingeklapte staat.

Opmerking: Als er een extra laadpunt op de rail is geïnstalleerd, kunt u de afstandsbediening gebruiken om de traplift naar het laadpunt te bewegen. Houd de knop omhoog of omlaag op de afstandsbediening ingedrukt tot de traplift automatisch stopt bij het laadpunt en u het geluid hoort dat aangeeft dat de traplift het laadpunt heeft bereikt en wordt opgeladen.

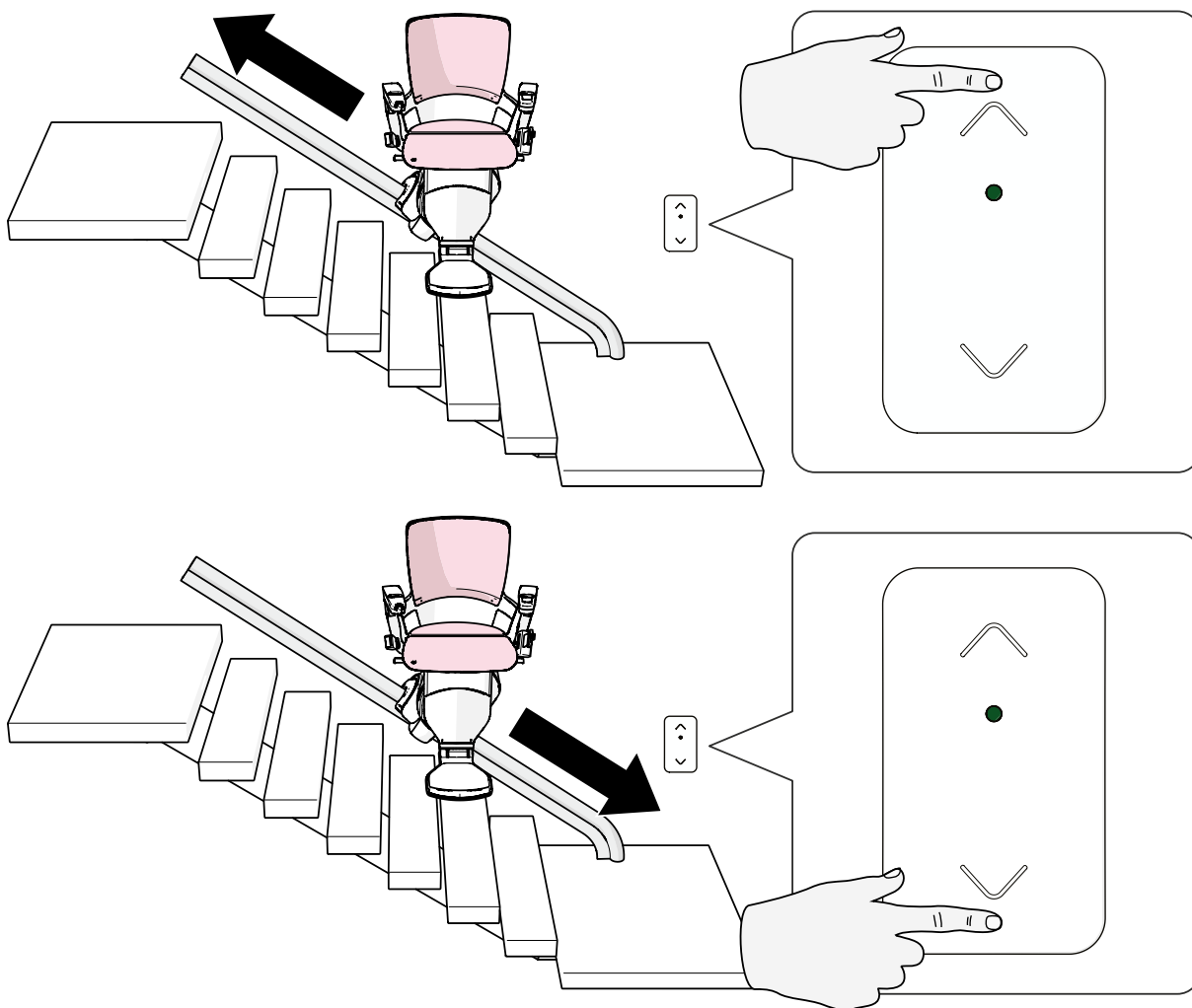

5 In geval van een storing


- Als uw traplift is uitgerust met een elektrische draaistoel, gebruikt u de noodontgrendeling om de stoel in de richting van de trap te draaien zodat u veilig kunt uitstappen.
- Als uw traplift is uitgerust met een handmatige draaistoel, gebruikt u de handmatige draaistoel - ontgrendeling om de stoel in de richting van de trap te draaien zodat u veilig kunt uitstappen.

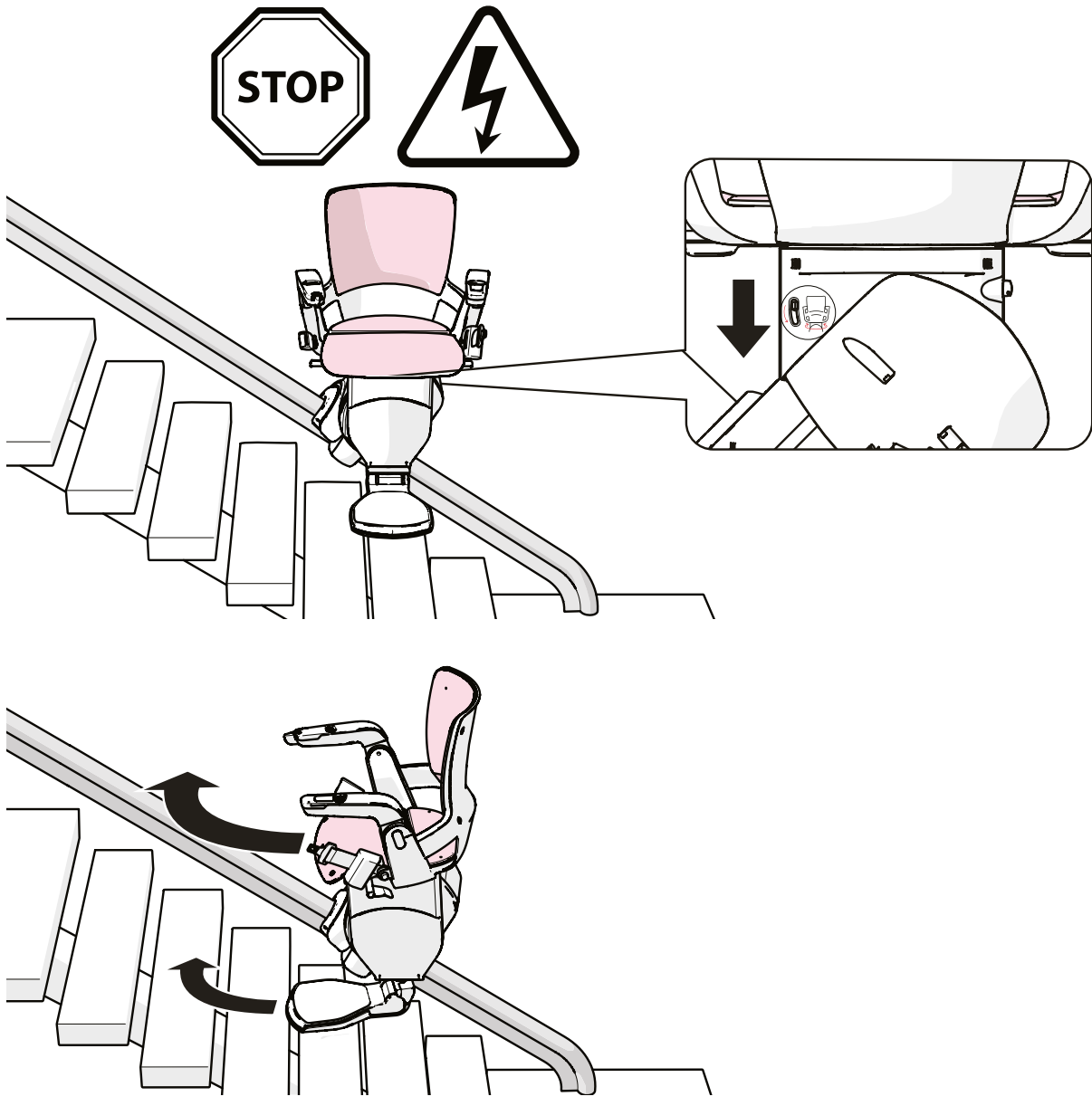

6 Optioneel: Om hulp roepen

- 1 Houd de gele belknop ~ 2 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Het scherm geeft nu een lijst met vooraf ingestelde contactpersonen weer.
- 2 Druk op de gele belknop om door de lijst te bladeren.

De geselecteerde contactpersoon wordt na 3 seconden automatisch gebeld.

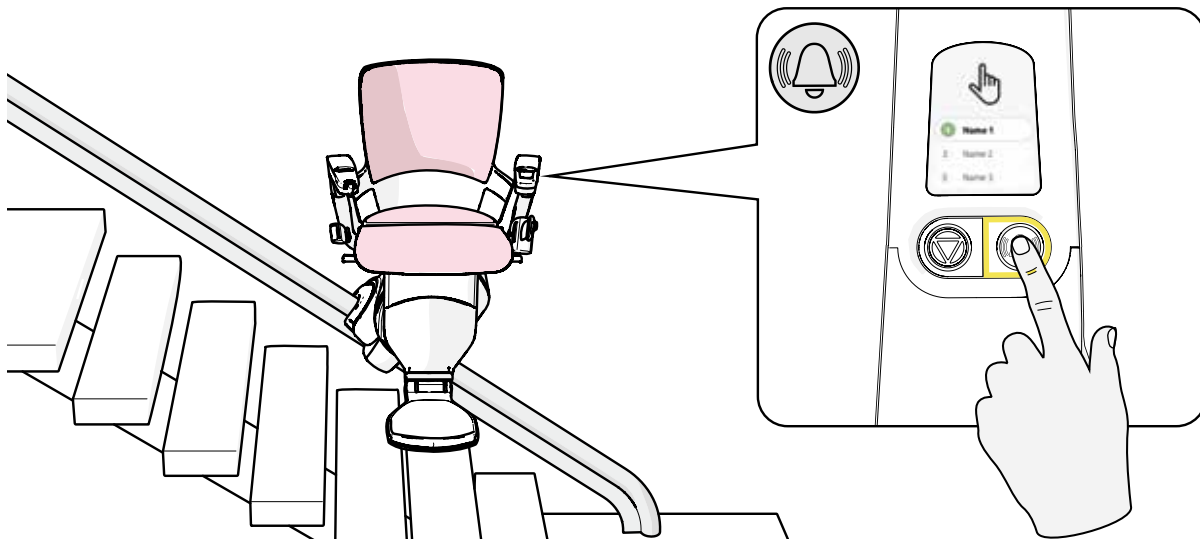

- 3 Druk op de gele belknop om het huidige gesprek te beëindigen.

Opmerking: Als u direct na de beëindiging van uw vorige gesprek een nieuw gesprek begint, wordt de volgende contactpersoon in de lijst uitgelicht.

Opmerking: De belfunctie werkt nog steeds als er sprake is van een storing aan het scherm is.

7 Berichten en alarmen op het display


Het display in de armleuning informeert u over de actuele status van de traplift. De traplift kan ook akoestische signalen afgeven. Raadpleeg het overzicht in dit hoofdstuk voor een toelichting van de berichten die op het display worden getoond.

7.1 Actuele status

Algemeen



De traplift is klaar voor gebruik.

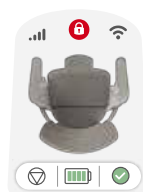

De traplift is vergrendeld voor gebruik door de sleuteleenheid.



De traplift beweegt naar links.



De traplift beweegt naar rechts.



De voetenplank beweegt omhoog.



De voetenplank beweegt omlaag.



De stoel van de traplift draait.



De veiligheidsgordel is vastgemaakt.



De traplift wordt gebruikt.

Verbindingen



De traplift heeft geen wifi-verbinding.



De traplift heeft een goede wifiverbinding.



De traplift heeft geen DECT-sigitaal.



De traplift heeft een goed DECT-sigitaal.


Storingen




De traplift is uitgeschakeld.



De veiligheidsgordel is niet vastgemaakt.

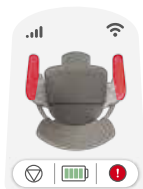

De armleuningen zijn niet (volledig) omlaag geklapt.
Duw de armleuning omlaag.

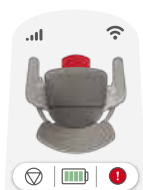

De voetenplank is niet (volledig) omlaag geklapt.
Druk de knop 'voetenplank omlaag' in en houd deze ingedrukt.



De zitting is niet (volledig) omlaag geklapt.
Ga op de stoel zitten.





De stoel is buiten de startpositie gedraaid.
Draai de stoel terug naar de startpositie.

Storingen



Er moet periodiek onderhoud aan de traplift worden gepleegd.

Storingen door obstructies

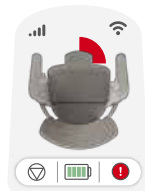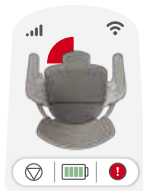

De voetenplank kan door een obstakel niet in de aangegeven richting bewegen.

Beweeg de andere kant op en verwijder het obstakel.



De traplift kan door een obstakel niet in de aangegeven richting bewegen.

Beweeg de andere kant op en verwijder het obstakel.


7.2 Alarmen op het display

Vergrendeling op afstand




De traplift is vergrendeld voor gebruik door de sleuteleenheid.


Parkeren

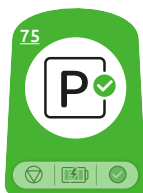

De traplift is in de parkeerpositie en wordt opgeladen.

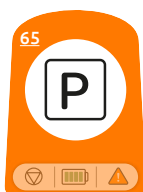

De traplift is in de parkeerpositie maar wordt niet opgeladen. Kijk of de stekker van de voedingskabel helemaal in de wandcontactdoos is gestoken.

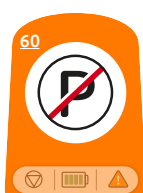

De traplift is niet in de parkeerpositie en wordt niet opgeladen. Beweeg de traplift verder naar de parkeerpositie om te voorkomen dat de batterij leegraakt.

Batterijstatus



De traplift is volledig opgeladen.



Het batterijniveau van de traplift is laag. Beweeg de traplift naar de oplaadpositie en laat de traplift opladen alvorens de traplift opnieuw te gebruiken.



De batterij van de traplift is leeg. Probeer de traplift naar de oplaadpositie te bewegen en laat de traplift opladen alvorens de traplift opnieuw te gebruiken. Als de traplift niet kan worden bewogen met behulp van de methoden die in deze handleiding worden beschreven, dient u contact op te nemen met de klantenservice om een monteur te bestellen.

Obstructies/storingen



De traplift kan door een obstakel niet in de aangegeven richting bewegen terwijl de joystick in die richting wordt gedrukt.

- Fout 20: Linkerzijde
- Fout 21: Rechterzijde


Beweeg de andere kant op en verwijder het obstakel.



De traplift kan door een obstakel niet in de aangegeven richting bewegen terwijl de joystick in die richting wordt gedrukt.

- Fout 25: Linkerzijde
- Fout 26: Rechterzijde

Beweeg de andere kant op en verwijder het obstakel.

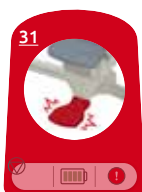

De voetenplank kan door een obstakel niet in de aangegeven richting bewegen terwijl de traplift in beweging is.

- Fout 30: Linkerzijde
- Fout 31: Rechterzijde

Beweeg de andere kant op en verwijder het obstakel.



De voetenplank kan niet omhoog geklapt worden.

- Fout 35: De voetenplank kan niet omhoog klappen.
- Fout 36: De voetenplank kan niet omlaag klappen.

Verwijder de obstructie en druk op de knop 'voetenplank omhoog' of 'voetenplank omlaag' om de voetenplank in of uit te klappen.



De armleuningen zijn niet (volledig) omlaag geklapt terwijl de traplift beweegt.

- Fout 40: Linkerzijde
- Fout 41: Rechterzijde

Druk de armleuning omlaag.

Obstructies/storingen



Elektrische draaistoel heeft het draaipunt niet bereikt.

Klap de voetenplank in en uit om te resetten.




De stoel is buiten de startpositie gedraaid terwijl de traplif beweeft.

Draai de stoel terug naar de startpositie.



De zitting is niet (volledig) omlaag geklapt.

Ga op de stoel zitten.

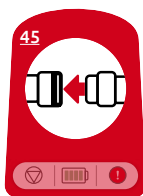

De veiligheidsgordel is niet vastgemaakt terwijl de traplif beweegt.

Overig



De traplif is defect en laat een alarmsignaal horen.

Schakel de sleutelschakelaar uit en weer in om de traplif te resetten (zie pagina 14).

Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neem dan contact op met de klantenservice om een monteur in te schakelen.



Er moet periodiek onderhoud aan de traplif worden gepleegd.

Neem contact op met de klantenservice om een monteur in te schakelen.



De batterij moet worden vervangen.

Neem contact op met de klantenservice om een monteur in te schakelen.



De traplif heeft geen wifi-verbinding.

8 Onderhoud

8.1 Reinigen

Het wordt aanbevolen de traplift ten minste één keer per week schoon te maken. Gebruik een zacht reinigingsmiddel en een zachte borstel of doek om de zitting te reinigen. Gebruik geen vetoplossende middelen of chloorhoudende, op siliconen gebaseerde of agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik een borstel om de tanden van de rail te reinigen en gebruik reinigingsdoekjes om de buizen van de rail schoon te houden. Gebruik niet te veel water.

8.2 Onderhoudsschema

De traplift moet regelmatig worden onderhouden om een langdurige werking zonder storingen te garanderen. Het wordt aanbevolen om de traplift eenmaal per jaar te laten inspecteren en onderhouden. De volgende onderdelen moeten ten minste elke 2 jaar worden geïnspecteerd: balanssensor, OSG (grendel) en de kunststof wielen. De inspectie moet worden uitgevoerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

8.3 De batterij van de afstandsbediening vervangen


De aan de muur bevestigde afstandsbediening gebruikt één AA -batterij.

Als de batterij bijna leeg is, knippert het lampje op de voorzijde van de afstandsbediening groen.

U kunt de batterij eenvoudig vervangen:

- 1 Verwijder de voorste afdekking voorzichtig van de behuizing.
- 2 Verwijder de lege batterij.
- 3 Plaats een nieuwe AA-batterij in de batterijhouder.

Opmerking: Zorg ervoor dat de polariteit van de batterij overeenkomt met de afstandsbediening.

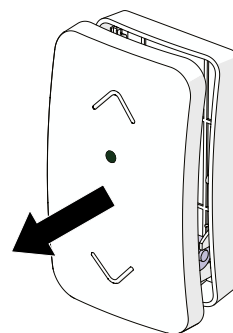

8.4 De batterij van de sleutel vervangen

De meegeleverde sleutel gebruikt één C2032 - knoopcelbatterij.

Als de traplift niet langer vergrendelt of ontgrendelt met de sleutel, is de batterij van de sleutel mogelijk bijna leeg.

- 1 Verwijder het batterijklepje van de achterzijde van de sleutel.
- 2 Verwijder de lege batterij.
- 3 Plaats een nieuwe C2032-knoopcelbatterij in de batterijhouder.

Opmerking: Zorg ervoor dat de polariteit van de batterij overeenkomt met de sleutel.

9 Verwijdering



De traplift bevat twee batterijen, elk van 12 volt (7 Ah) om de traplift van voeding te voorzien.

Deze batterijen mogen uitsluitend worden vervangen door bevoegde onderhoudsmonteurs. De afstandsbedieningen zijn uitgerust met een AA penlite batterij. U kunt deze batterijen zelf vervangen.

Werp oude batterijen niet weg met het gewone huisafval maar lever ze in wanneer u de nieuwe batterijen aanschaft.



Een Otolift die niet langer wordt gebruikt, kan worden teruggenomen door de leverancier. Hij kan hier echter zelf vrij toe besluiten. De leverancier is niet wettelijk verplicht om de Otolift terug te nemen. Neem voor advies hierover bij voorkeur contact op met de leverancier. Is dit niet mogelijk, informeer dan bij de plaatselijke overheid wat de mogelijkheden zijn om materiaal op een milieuvriendelijke manier af te voeren.

10 Technische gegevens

Algemeen	
Maximale laadcapaciteit	125 kg
Capaciteit batterij	7.0 Ah
Brandbestendigheid	EN81 - 40 - volgens 5.1.4. Fire resistance
Geluidsemissie	<50 dB(A)
Elektrisch systeem	
Voedingsspanning	24 V; 1,4 A
Hoofdvoeding	230V; 33,6W; 0,15 A / 115V; 33,6W; 0,29 A / 240V; 33,6W; 0,14 A (Geselecteerd per regio, controleer voeding)
Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-15 – 50°C
Relatieve luchtvochtigheid	90% RLV (niet - condenserend)


10.1 Typeplaatje



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Typecode | 6 Productiedatum |
| 2 Serienummer | 7 Modelnaam |
| 3 Barcode | 8 Maximale nominale belasting |
| 4 Logo fabrikant | 9 Markering van CE-conformiteit |
| 5 Contactgegevens fabrikant | 10 Website van de fabrikant |

Bijlage 1: Schema

NL

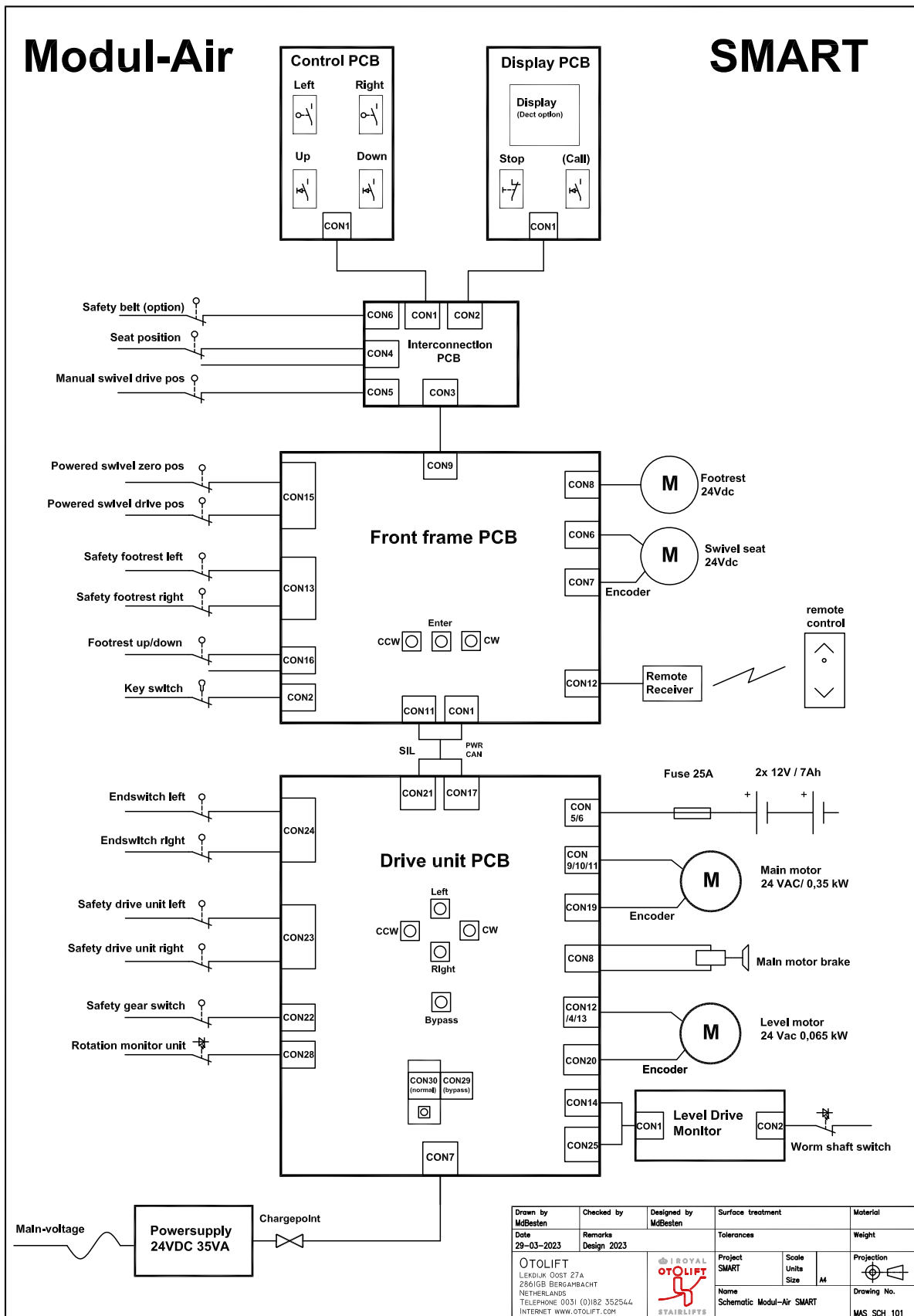

Otolift Stairlifts

PO Box 64

2860 AB Bergambacht

The Netherlands

info@otolift.com

Otolift.nl

